

의약외품

멸균제품

일회용

재사용금지

친수성 폼 드레싱

# Medifoam<sup>®</sup> Band

	일반형 3EA	타원형 3EA	소형 2EA
폴리우레탄 점착필름 크기	3×7cm	3.4×6.8cm	5.5×7.5cm
폼 크기	1.5×3.4cm	2×3.5cm	2.5×3.5cm

**성상** : 폴리우레탄 점착필름의 중앙부분에 유백색 폴리우레탄 기포제가 부착되어 있는 밴드

**효능·효과** : 하지궤양, 욕창 및 외과적 상처의 드레싱에 사용합니다.

**용법·용량** : 환부를 세척(생리식염수 세척 등)하고 흡수체(유백색층)를 환부에 직접 접촉하도록 부착합니다. 삼출물이 과다 흡수되면 드레싱을 교환합니다.

**사용상의 주의사항** : 이 제품은 hydrochlorite 용액(Eusol 등) 또는 과산화수소와 같은 산화제(Oxidising Agent)와 함께 사용하면 기포성 충전제가 파괴될 수 있으므로 주의 바랍니다.

이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

**제조번호** : 별도 표기 **제조년월일** : 별도 표기 **사용기한** : 제조일로부터 3년까지

**저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **중량** : 51.4mg/cm<sup>2</sup>

판매자



한국먼디파마(유)

서울특별시 중구 한강대로 416번지 서울스퀘어 3층

제품문의처 080-800-5689

제조사



(주)제네웰

경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 281-2

www.genewel.com



8 806129 699277

® : 메디폼 and MEDIFOAM are Registered Trademarks.